

L/O/G/O

Центральное стерилизационное отделение





Центральное стерилизационное отделение находится в цокольном этаже нового здания. Общая площадь ЦСО-605,7 м. Отделение работает в круглосуточном режиме. Приём инструментария на обработку проводится согласно накладным-требованиям, в которых указывается наименование и количество инструментов. Также, ЦСО осуществляет стирку уборочного инвентаря (мопы, салфетки) отделений в специализированных машинах- автоматах. Сотрудники ЦСО готовят перевязочный материал для всех подразделений ГУЗ ЗКОД ежедневно. Отделение достаточно оснащено новейшим оборудованием для проведения качественной дезинфекции и стерилизации медицинского инструментария, операционного белья и перевязочного материала. Штат отделения укомплектован грамотными медицинскими работниками. Старшая медицинская сестра: Клочко Наталья Валерьевна.



ЦСО- это важнейшее структурное подразделение современного хирургического стационара, призванное:

- ➔ Обеспечивать операционные и клинические отделения стерильными изделиями медицинского назначения.**
- ➔ Повышать эпидемическую безопасность пациентов и персонала.**
- ➔ Сокращать расходы на неспецифическую профилактику ИСМП.**

В нашем ЛПУ сосредоточены последние технические инновации и новые методики дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации ИМН.



Прием ИМН на обработку в ЦСО осуществляется согласно накладным-требованиям на стерилизацию, в котором указывается наименование и количество инструментов в упаковке. Корзины, с указанием отделений ЛПУ, помещаются на стеллажи.



ИМН загружаются в моечный автомат проходного типа с двумя откидными дверями для отделения грязной зоны от чистой.

Укладка ИМН в инжекторы свободно, в раскрытом виде.

Автомат имеет десять сетчатых контейнеров, что позволяет за один цикл обработать большое количество инструментов.



Моечный автомат Miele G 7892 для дезинфекции и ПСО жёстких эндоскопов, съёмных частей наркозно-дыхательной аппаратуры и операционного оборудования.





Автомат для дезинфекции и ПСО Miele G 7826, в котором запрограммированы следующие функции:

- замачивание изделий
- мойка
- ополаскивание водопроводной водой
- ополаскивание деминерализованной водой
- высушивание
- все фазы обработки документируются с помощью встроенного принтера

Обработка инструментария осуществляется способом машинной мойки с использованием термической дезинфекции при температуре 93°C в течение 10 минут.





**Выгружаются
инструменты из автомата
в чистой зоне на тележке-
держателе и доставляются
в зону упаковки ИМН.**





-ИМН после полного охлаждения готовятся к комплектации.

-Инструменты с внутренними каналами просушиваются воздухом под давлением до полного удаления влаги из полости.

-Упаковываются инструменты на упаковочной станции марки HAWO согласно количеству, указанному в требовании на стерилизацию.





Операционное бельё упаковывают в два слоя крепированной бумаги, которая фиксируется лентой-индикатором для контроля стерилизации.





Упакованное операционное белье перед стерилизацией помещают в корзины вертикально, чтобы пар мог равномерно проходить сверху вниз между его слоями.

На упаковке указывается наименование операционного белья, количество, дата стерилизации.





Стерилизатор-СТЕРРАД-использует пары пероксида водорода в сочетании с низкотемпературной плазмой. Эта технология применяется для стерилизации широкого спектра инструментов, но особенно подходит для термолабильных изделий, так как процесс стерилизации производится в среде с низкой влажностью при температуре около 50°С.





**ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР
STERIVAP:
НА ЗАГРУЗОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
ВЫСТАВЛЕНЫ
КОРЗИНЫ С МАТЕРИАЛОМ И ИМН:**





Проводится выбор программы для стерилизации изделий медицинского назначения;

- режим обработки перевязочного материала, ИМН -134 градуса, 7 мин

-режим 121 градус 20 минут для изделий из резины и пластика



Весь процесс стерилизации фиксируется с распечаткой протокола с записью всех параметров давления и температуры в стерилизационной камере.



**СТЕРИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ МЕД. НАЗНАЧЕНИЯ
ВЫГРУЖАЮТ ИЗ ПАРОВОГО СТЕРИЛИЗАТОРА НА ТЕЛЕЖКЕ И
ОСТАВЛЯЮТ НА 1-1,5 Ч ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В СТЕРИЛЬНОЙ
ЗОНЕ.**





После этого корзины со стерильным материалом отправляют в помещение для хранения стерильного материала.





**График выдачи стерильного белья, ИМН
- С 8ч 00м до 09ч 30**

**Транспортировка стерильных изделий в отделения
осуществляется в специальных металлических шкафах-
контейнерах.**

